~簡単!機種別AEDの使い方マニュアル~

① AEDの機種







② ケースを開けた状態





③ 電源を入れる



蓋を開けると電源が入る




電源ボタンを押す



蓋を開けると電源が入る



④ パッドを袋から取り出して、パッドの絵のとおりに貼り付ける。(※必ず肌に直接貼ること!)

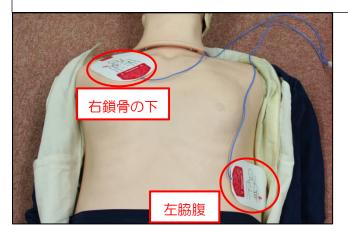



⑤ コネクターの確認







コネクターを差し込む



コネクターが接続されている



⑥ 「患者から離れて下さい」等の音声メッセージが流れると、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を 一時中断して患者から離れる(他に患者に触れている人がいないか注意!)



- ⑦ 音声メッセージに従い、誰も触れていないことを確認しショックボタンを押す
- ※ 「ショックは不要」のメッセージの場合は、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を継続







- ⑧ 約2分後に⑥の音声メッセージが再び流れるので、それまでの間は胸骨圧迫(心臓マッサージ)を中断せず続ける
- ※ 以後、体の動きが見られるまで、⑥~⑧を音声メッセージに従って繰り返す





